

夏天试剂盒的保存



一.免疫荧光和全自动PCR的试剂盒都有存储温度上限（4-30℃），环境温度长期超过温度上限，PCR试剂盒和荧光试剂卡都有逐渐失效的风险。

二.如医院保证不了上限温度，将**荧光试剂卡**、全自动PCR检测项目的所有**冻干粉**（PK管和PCR干粉管），放入冰箱4℃冷藏，使用时取出，室温回温半小时再开封使用。


注：

1. 荧光免疫的样本稀释液不要放入冰箱，不然不能保证免疫反应的特异性和灵敏性。
2. 全自动PCR试剂盒以及样本处理液/样本保存液不要放入冰箱，考虑到医院冰箱空间有限，再一个低温使试剂盒中的裂解液易析出盐结晶，需回温很久才能使结晶溶解。

荧光免疫的校准卡和试剂卡



荧光免疫的稀释液

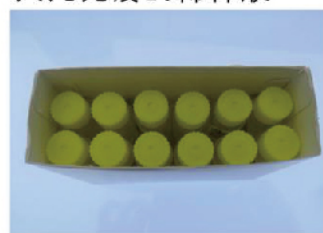

PK干粉管和PCR干粉管



全自动PCR试剂盒及样本保存液

可放入冰箱冷藏（铝箔包装）

不可放入冰箱冷藏